

NÁVOD NA POUŽITIE OČNEJ SPRCHY



APLIKÁCIA:

Vyplachovanie rán, mechanické vyplachovanie očí, vyplachovanie a čistenie ústnej dutiny, čistenie a oplachovanie nástrojov a chirurgických zariadení, pooperačné zavlažovanie.

NÁVOD NA POUŽITIE:

1. očný lievik nasadíte na fľašu
2. otočením o 180° uvoľníte plastový uzáver
3. lievik priložíte na postihnuté oko
4. tlakom na fľašu vyplachujete do vyprázdnenia

SKLADOVANIE:

Skladujte v pôvodnom obale, v neotvorenom a nepoškodenom stave a na suchom mieste pri teplote 5 - 25 ° C. Krehnutiu materiálu a plastového obalu zabránite tým, že nebudete výrobok vystavovať slnečnému svitu ani UV žiareniu.