

256052 - 256053

1. Pred použitím boxu nasadte veko.



2. Po naplnení 80% objemu boxu zaklapnete tlakom bezpečnostné viečko. Dve polohy viečka – pohotovostná a konečná.



Zářezy vo viečku slúžia na sňatie použitých injekčných ihlích bez dotyku ľudskej ruky.

Prípustná plniaca hmotnosť stanovená									
4L	2,4Kg	5L	3Kg	6L	3,6Kg	8L	4,8Kg	10L	5,4Kg

Boxy môžu byť plnené odpadom, ktorého súčasťou sú aj zvyšky tekutín. Súhrnný obsah tekutín odpadu nesmie presiahnuť 5% z prípustnej plniacej hmotnosti. Pokiaľ túto hranicu presiahne, tak musí byť vždy k odpadu pridané dostatočné množstvo pohlcujúcej látky. Boxy nezaručujú dlhodobú absolútnu tesnosť. Pred likvidáciou ponechať v plniacej polohe. Nesmie dôjsť k mechanickému poškodeniu a deformácii vlastnej nádoby nevhodnou manipuláciou.