



Prepravný kontajner

1 Záruka

Každý výrobok prechádza v spoločnosti Wanzl starostlivou výstupnou kontrolou.

Ak by sa predsa len vyskytol dôvod na reklamáciu, spoločnosť Wanzl postupuje pri jej riešení nasledovne:

Poruchy, ktoré sa objavia v priebehu prvých 12 mesiacov od dátumu dodania (alebo v priebehu inej zmluvne stanovenej záručnej doby), odstráni spoločnosť Wanzl bezplatne, pokiaľ sú preukázateľne ich príčinou materiálové alebo výrobné nedostatky.

Záruka sa nevzťahuje na diely s obmedzenou životnosťou, ako sú napr. svetelné závary.

Záručná doba pre nabíjateľné batérie je 6 mesiacov.

Spoločnosť Wanzl znáša v prípade záruky náklady na materiál, montáž, cestovné a prepravné náklady.

Akékoľvek ďalšie nároky sú vylúčené.

Záručná doba začína plynúť momentom dodania, resp. montáže vykonanej montérmi spoločnosti Wanzl alebo špecializovanými prevádzkami, ktoré sú autorizované spoločnosťou Wanzl, a trvá 12 mesiacov (alebo iný čas trvania zmluvne stanovenej záručnej doby).

Vymenené poškodené diely prechádzajú do vlastníctva spoločnosti Wanzl.

Plná záruka sa preberá len vtedy, ak montáž, servisné úkony a opravy vykonali montéri spoločnosti Wanzl alebo špecializované prevádzky, ktoré sú autorizované spoločnosťou Wanzl.

Pri škodách, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo cudzím zavinením, nárok na záruku nevzniká.

Nároky na záruku zanikajú, pokiaľ spoločnosť Wanzl nedostane do 14 dní od zistenia poruchy písomné oznámenie s uvedením čísla zákazky a objednávky, ako aj opisu konkrétnej poruchy.

Záručná doba sa neobnovuje vykonaním záručných výkonov.

Na vymenené diely poskytuje spoločnosť Wanzl novú 12-mesačnú záruku (alebo inú zmluvne stanovenú záručnú dobu).

Nároky na záruku sa premlčia po 12 mesiacoch (alebo po uplynutí inej zmluvne stanovenej záručnej doby) od doručenia písomného oznámenia spoločnosti Wanzl.

2 Bezpečnosť



Pred montážou a uvedením do prevádzky si starostlivo prečítajte tento návod. Uschovajte si tento návod pre prípad ďalšieho použitia.

2.1 Použitie v súlade s určením

- Prepravný kontajner na prepravu tovarov v priemyselnom odvetví.

2.2 Oblasti použitia

- Oblasť použitia len v interiéroch alebo exteriéroch chránených pred poveternostnými vplyvmi na pevnom, plochom a vodorovnom podklade!
- Dodržiavajte miestne stavebné a bezpečnostné predpisy, ako aj predpisy úradu zdravotníctva a dohliadajúcich úradov.

2.3 Výstražné a bezpečnostné pokyny



Výstraha: Pri nerovnomernom zaťažení, preťažení alebo nesprávnom použití sa prepravný kontajner môže prevrátiť alebo zlomiť.

Dôsledok: Zlomenie prepravného kontajnera a nebezpečenstvo poranenia osôb a/alebo poškodenia predmetov.

- ▶ Prepravný vozík používajte len na pevnom, rovnom a vodorovnom podklade.
- ▶ Prepravný kontajner zaťažujte len rovnomerne.
- ▶ Prepravný kontajner používajte len v súlade s určením.
- ▶ Dbajte na to, aby sa prepravný kontajner nemohol samovoľne uviesť do pohybu.
- ▶ Dbajte na to, aby sa na prepravný kontajner nevešali alebo nešplhali žiadne osoby, zvlášť deti.
- ▶ Dbajte na to, aby nikto nestúpал do prepravného kontajnera alebo naň.



Výstraha: Nebezpečenstvo poranenia pri otváraní a zatváraní dverí.

Dôsledok: Poranenie, pomliaždenie alebo odrezanie ruky alebo prstov.

- ▶ Pri otváraní a zatváraní dverí dávajte pozor na nebezpečenstvo poranenia a pomliaždenia rúk alebo prstov.


- Prepravný kontajner nepreťažujte.
- Prepravný kontajner zaťažujte len rovnomerne, nie jednostranne.
- Dbajte na to, aby z prepravného kontajnera nevyčnieval žiadny tovar.
- Nikdy nevchádzajte do prepravného kontajnera ani naň nevystupujte.
- Prepravný kontajner nepoužívajte na prepravu osôb ani zvierat.
- Pravidelne kontrolujte funkčnosť koliesok a či nie sú poškodené.
- Poškodený prepravný kontajner už nepoužívajte, príp. nechajte prepravný kontajner opraviť.
- Vylúčte ohrozenie a nebezpečenstvo poranenia zákazníkov a personálu.
- Používajte len originálne náhradné diely Wanzl.
- Údržbu vykonávajte pravidelne a zdokumentujte ju.
- Servisné práce a opravy nechajte vykonávať len odborníkom spoločnosti Wanzl alebo firmám autorizovaným spoločnosťou Wanzl.


3 Technické údaje

Model		Prepravný kontajner		
Rozmery	Šírka	720 mm		
	Hĺbka	810 mm	815 mm	
	Výška	v závislosti od variantu 1950 mm 1850 mm 1650 mm	1540 mm	1640 mm
Nosnosť pri rovnomernom naložení	Spolu	500 kg		
	Na jednu úroveň	100 kg	75 kg	75 kg
Hmotnosť		cca 24 kg, uzavretý s 2 úrovňami cca. 50 kg	cca 23 kg	
Obj. č.		06.05537. xx-xxxx	06.13108. xx-xxxx	06.13110. xx-xxxx

Príslušenstvo	Kôš na defektúrne pripravované lieky len pre artikel 06.13108.xx-xxxx		
Rozmery	Š x H x V	660 x 720 x 250 mm	
Nosnosť (rovnomerne naložené)		75 kg	
Vlastná hmotnosť		cca 5,5 kg	
Obj. č.		20.02600. xx-xxxx	

3.1 Náhľad

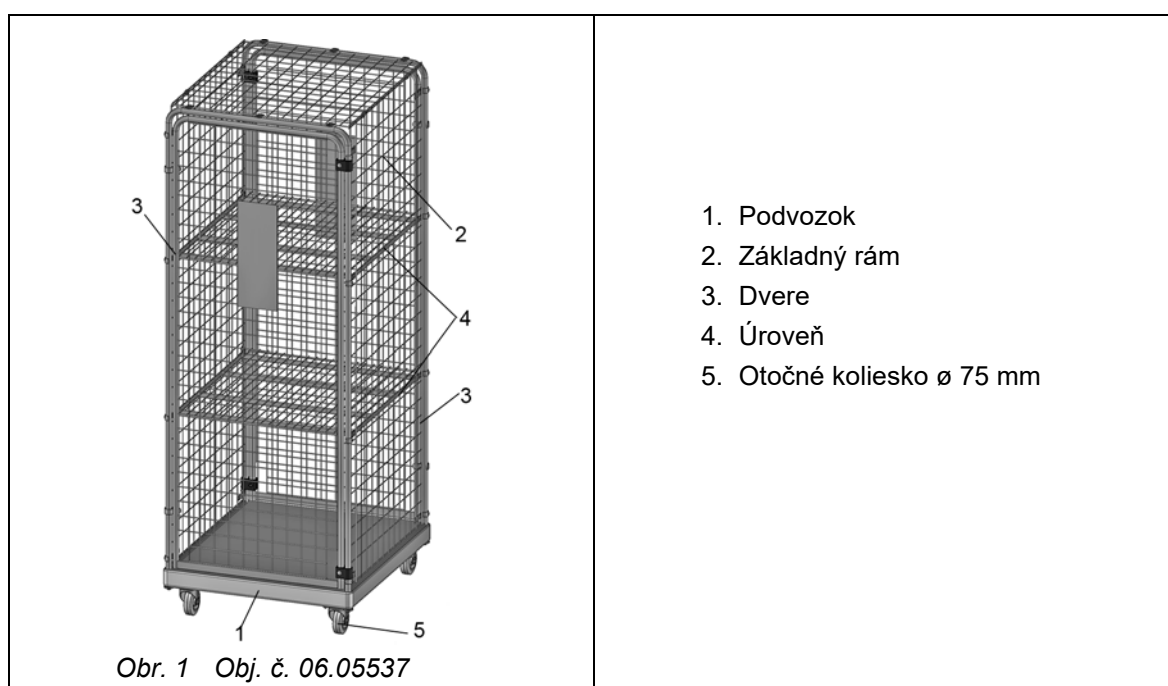

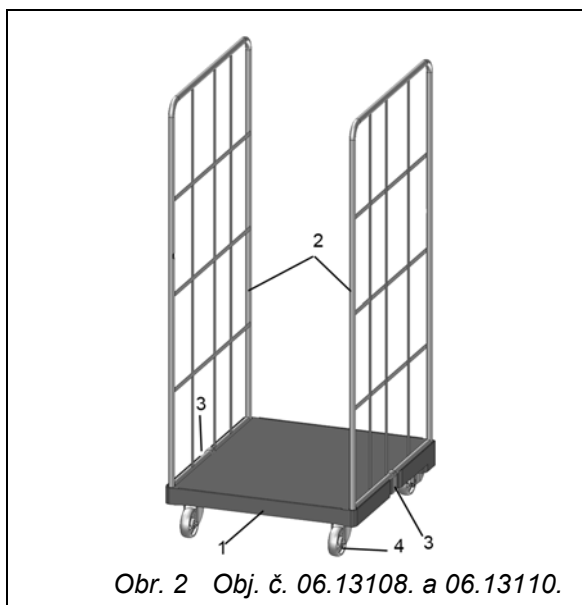


1. Podvozok
2. Bočná časť
3. Pridržiavacia svorka
4. Otočné koliesko $\varnothing$ 108 mm

4 Montáž


4.1 Obj. č. 06.05537.xx-xxxx

4.1.1 Otvorenie a zatvorenie dverí

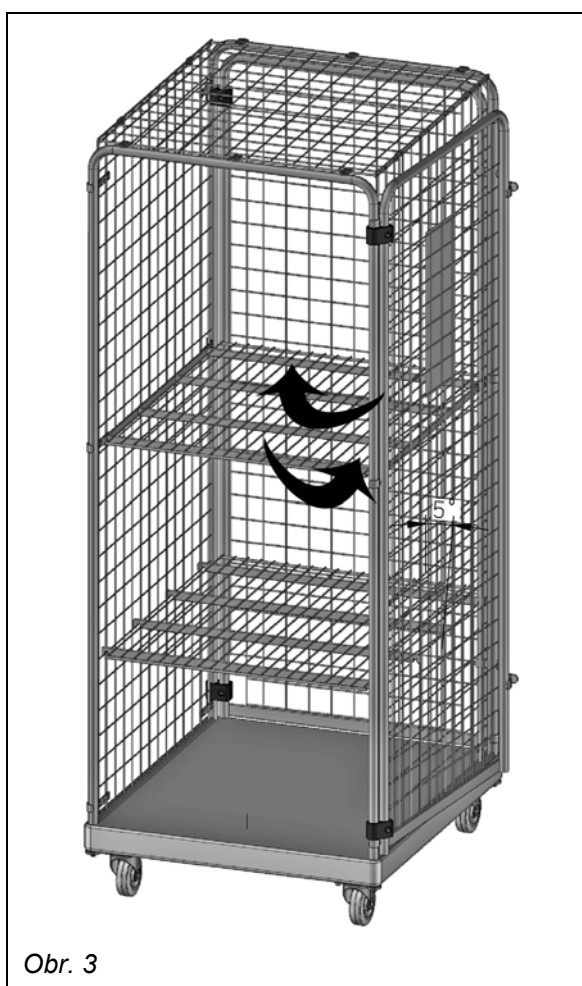

Dvere sa zadržiavajú pomocou aretácie.

A = otvorená aretácia
B = zatvorená aretácia

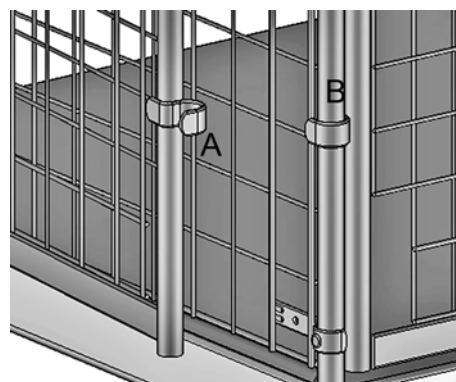


Obr. 4

- Pri otváraní dverí uvoľnite aretáciu potiahnutím za dvere.
- Zatlačte aretáciu na zatvorenie dverí proti čelnému oblúku


4.1.2 Zavesenie regálov




V závislosti od variantu môžu byť regály pri dodávke už pevne namontované.

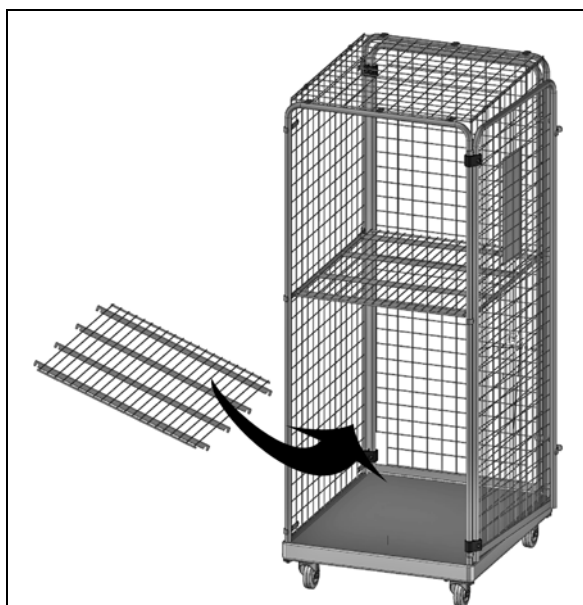

Obr. 5

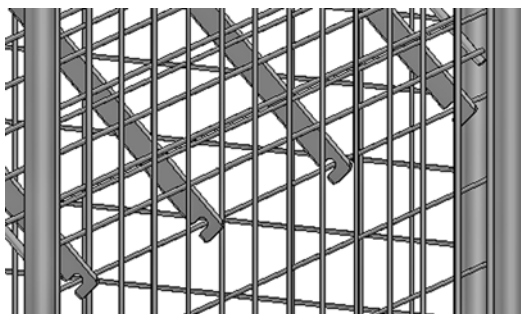


Obr. 6

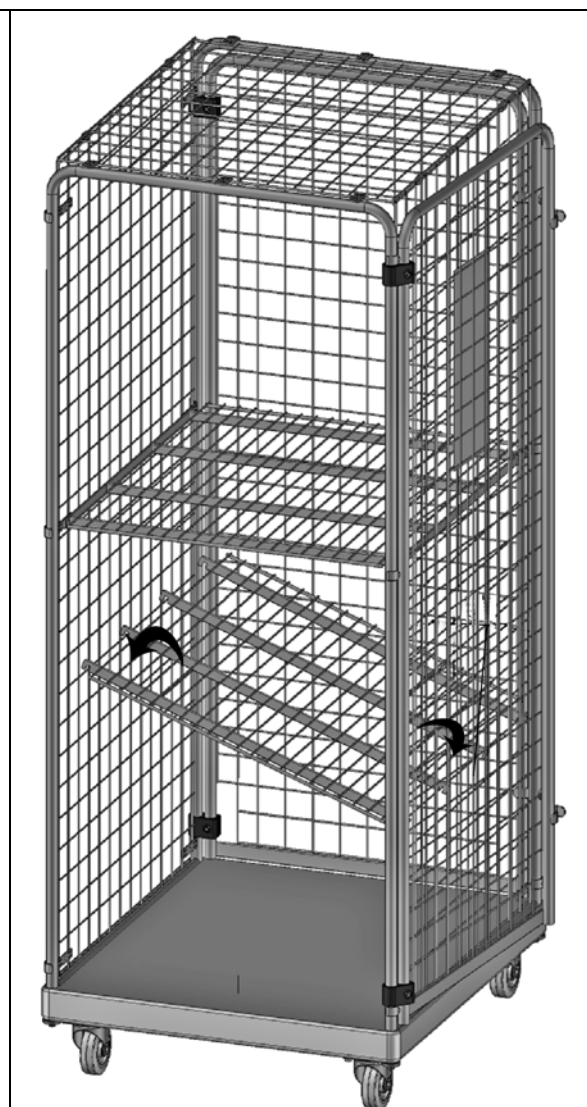


Obr. 7


4.2 Obj. č. 06.13108.xx-xxxx a 06.13110.xx-xxxx

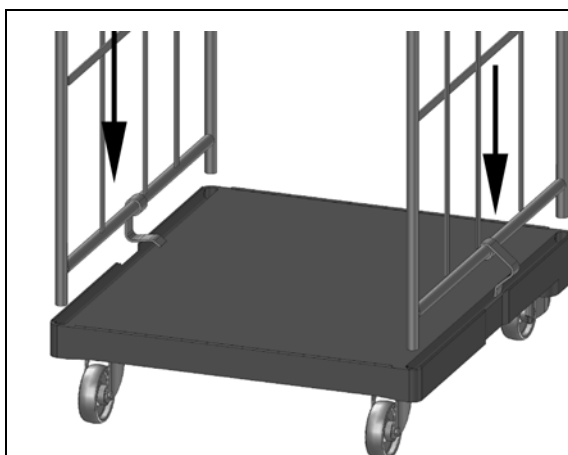


Obr. 8

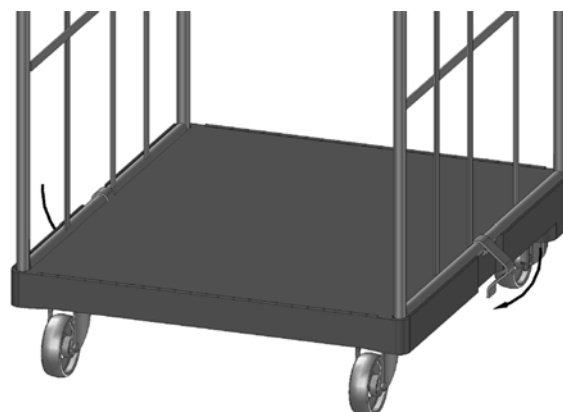


Obr. 9

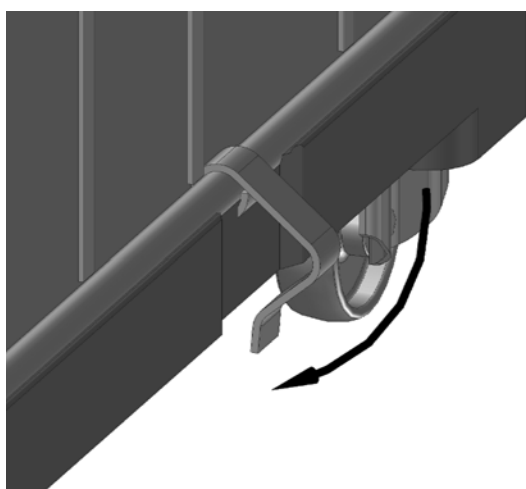

Obr. 10

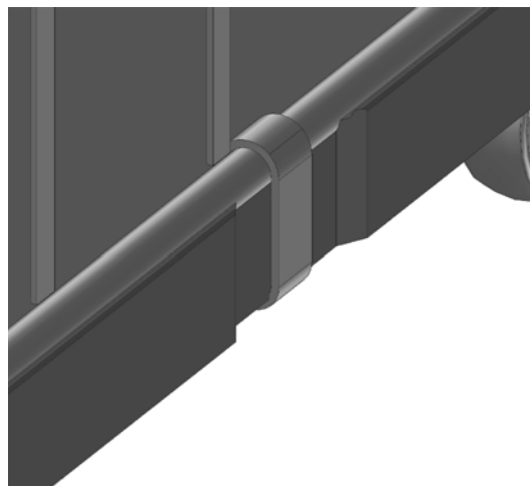

Obr. 11

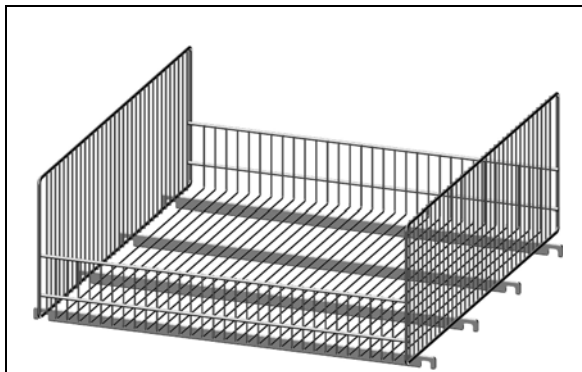4.3 Príslušenstvo iba pre transportné kontajnery Obj. č. 06.13108.xx-xxxx

Obr. 12



Obr. 13



Obr. 14

Wanzl GmbH&Co.KGaA,
 Rudolf-Wanzl Straße 4, 89340 Leipheim, Nemecko
 Tel. +49(0)8221/729-0, fax +49(0)8221/729-1000,
 e-mail: info@wanzl.com. internet: www.wanzl.com
 Autorské právo na tento návod patrí firme Wanzl .

Tento návod je určený len pre prevádzkovateľa a jeho personál. Obsahuje predpisy a pokyny, ktoré sa nesmú úplne ani po častiach rozmnožovať, rozširovať alebo inak zverejňovať. Porušenia môžu byť trestnoprávne stíhané. Údaje o rozmeroch sú len približné. Konštrukčné zmeny vyhradené.